

PER-COOL 520

Soluzione pronta specifica per igienizzazione rapida a basso impatto sulla salute delle persone e degli animali domestici.

CAMPI DI IMPIEGO:

- Superfici e attrezzature fisse e mobili del blocco operatorio;
- camere bianche, filtri, aspiratori, piccoli dispositivi medici e presidi chirurgici, acciaio inox, tutte le attrezzature biomedicali, macchine da laboratorio e piani di lavoro, pareti verticali e orizzontali;
- studi dentistici, cliniche private, ospedali, camere bianche;
- igienizzazione quotidiana di impianti, mezzi di trasporto (autobus, aerei, treni, ambulanze), macchinari del settore farmaceutico quali frigoriferi, banchi, piani di lavoro, utensili;
- igienizzazione dell'aria degli ambienti ed oggetti nell'ambiente esposti all'aria.

ISTRUZIONI PER L'IMPIEGO

Inserire la soluzione nel serbatoio di RamyHealth MEDICAL CLEANER 4D ed iniziare il processo di igienizzazione. Non è necessario il risciacquo. Controllare l'umidità relativa dell'aria prima dell'utilizzo tenendo conto dei tempi di igienizzazione.

Tempo di disinfezione in relazione all'umidità:

- Umidità relativa da 0% a 40%, 1 minuto;
- Umidità relativa da 30% a 60%, 2 minuti;
- Umidità relativa da 60% a 70%, 3 minuti;
- Umidità relativa da 70% a 80%, 4 minuti;
- Umidità relativa oltre 80%, la saturazione di igienizzante nell'aria potrebbe essere insufficiente.

Areare i locali dopo l'utilizzo.

PRODOTTO DA OLDENCHEMICAL (TO).

LA SCHEDA TECNICA E' DISPONIBILE PRESSO: RAMY HEALTH SPA Via San Gregorio, 55 20124 Milano (MI)
PER ESCLUSIVO USO PROFESSIONALE. NON DISPERDERE IL CONTENITORE NELL'AMBIENTE.



Liquido e vapori infiammabili. Provoca grave irritazione oculare. Può provocare sonnolenza o vertigini. Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non Fumare. Evitare di respirare la polvere la nebbia/i vapori/gli aerosol. Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/Il viso. IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliersi di dosso immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle [o fare una doccia]. IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. In caso di malessere, contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/... Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico. In caso d'incendio: utilizzare acqua nebulizzata, polvere chimica, CO2 per estinguere. Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato. Conservare in luogo fresco e ben ventilato. Smaltire il prodotto/recipiente in un impianto di eliminazione o in un punto di raccolta autorizzati.

Contiene: Alcool isopropilico, perossido d'idrogeno.



Healthy Together

RAMY HEALTH SPA
Via San Gregorio, 55 20124 Milano (MI)



0362 459403 Fax 02 93650536



info@ramyhealth.com

UN 1993

LT. 5